

Masseur personnel de paupières – Notice d'utilisation



1



2




3

1. Utiliser une seule fois par jour en pressant 5 à 10 fois les paupières. Ne pas ouvrir le massEUR plus que nécessaire.
2. Si vos paupières ont un excès de peau, veillez à soulever cet excès de peau avant de placer le massEUR sur vos paupières fermées.
3. Placer doucement le massEUR sur vos yeux fermés et presser doucement mais fermement le massEUR.
4. Le massEUR doit glisser le long de vos paupières. De haut en bas pour la paupière supérieure et de bas en haut pour la paupière inférieure.
5. Si une des paupières se retourne lors du massage, vérifier qu'aucun excès de peau ne soit pris dans le massEUR et/ou essayer de modifier la position du massEUR sur les paupières.
6. Le massage ne doit en aucun moment être douloureux.
7. Si vous ressentez une quelconque douleur, réduisez la force du massage.
8. Si la douleur persiste, arrêtez d'utiliser le massEUR et prenez contact avec votre ophtalmologiste.
9. Vous ne devez pas voir de couleurs durant l'utilisation.
10. Ne pas utiliser si vous avez été opéré des yeux ou des paupières récemment (- de 6 mois)
11. N'oubliez pas de lire les informations au dos de l'emballage avant utilisation.

Confort pour sécheresse oculaire

La massage des paupières est un élément central de la prise en charge des problèmes de sécheresse oculaire.

eyepeace® est un nouveau dispositif médical, marqué CE qui a été créé par des ophtalmologistes reconnus. L'Eyepeace a été conçu pour lutter contre le Dysfonctionnement des Glandes de Meibomius (DGM), la sécheresse oculaire, la blépharite et les chalazions. Il est conçu pour permettre un massage non invasive des glandes de Meibomius dans un geste vertical.

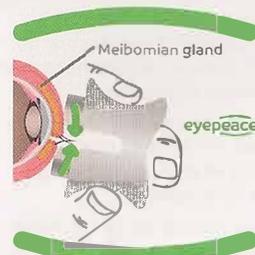


- Ne pas utiliser si vous portez des lentilles de contact.
- Demander un avis médical avant d'utiliser le massEUR si vous présentez: une blessure oculaire, une chirurgie oculaire ou des paupières ou du glaucome.
- Ne pas appliquer sur une plaie ouverte ou une zone infectée.
- Si une rougeur ou une irritation apparaissent, arrêtez l'utilisation du massEUR et demandez un avis médical.
- Suivre les instructions d'utilisation. Vous ne devriez pas ressentir de douleur ou voir des flashes colorés pendant l'utilisation.
- Pour une utilisation sur un enfant, demandez un avis médical.
- Il est recommandé de remplacer le massEUR tous les 12 mois.
- Ne pas utiliser si le massEUR est endommagé.
- Pour plus d'informations, regarder les vidéos sur www.eyepeace.org.uk

info@eyepeace.org.uk
Téléphone: 00 44 (0) 28 9521 2035



eyepeace™

Masseur personnel
de paupières

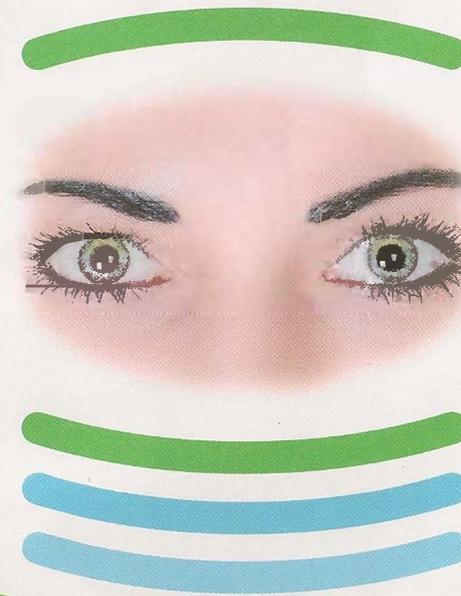

Notice d'utilisation